



聚乙烯输注管说明书

Instruction For Use

产品名称:

聚乙烯输注管

型号、规格:

150厘米

产品性能结构及组成:

本产品材料为聚乙烯，规格150cm。
本品由保护帽；6%外圆锥(鲁尔)锁定接头；6%内圆锥(鲁尔)锁定接头和管路组成。一次性使用。

产品适用范围:

在临床上用于尼膜同输液给药。

生产企业名称:

Fresenius Kabi AG

企业注册地址:

61346 Bad Homburg GERMANY

生产地址:

Clinico Medical Sp.z o.o. Blonie
k/Wroclawia, ul. Roberta Kocha 1
Blonie, 55-330 Miekinia, POLAND

代理人:

拜耳医药保健有限公司

售后服务机构:

拜耳医药保健有限公司

联系方式:

广州经济技术开发区友谊路103号
510730

电话: 020 37185114

传真: 020 82214681

注册号:

国食药监械(进)字2014第3660915号

产品标准:

YZB/GER 0443-2014

注意事项:

超过有效期或包装破裂后严禁使用。

该管已利用环氧乙烷灭菌，无热原。

一次性使用，用后销毁。

有效期:

五年

安装和使用说明:

1.用手指弹开顶盖，不要打开金属圈。

2.用50ml注射器吸入尼膜同®注射液。

3.只能使用提供的聚乙烯输注管，医院的聚氯乙烯管不能使用。

4.尼膜同®需用聚乙烯管通过三通阀以联合输液的方式，经中心静脉插管用输液泵连续静脉输注，禁止单独输注尼膜同®注射液，禁止将尼膜同®注射液加入其它输液瓶或输液袋中。

5.将输注管与中心静脉导管相连。

注意：连到外周静脉血管有导致血栓性静脉炎的危险。

6.给药剂量和速度请参考尼膜同®注射液说明书。

7.产品最大可使用压力为200kPa。

REF M78415231CN

 切勿再次使用

CE0123

 参考使用说明

 避免日晒

STERILEEO 经环氧乙烷灭菌

 保持干燥

 包装破损时切勿使用

P 安全用于压力输液装置